

Checkme Pulsebit O2

Spánkový monitor

Uživatelský manuál

Představení produktu

Spánkový monitor **Checkme O2** slouží ke sledování hodnot SpO2 a pulsu. SpO2 je saturace krve kyslíkem, tj. kolik kyslíku přenáší červené krvinky.

Bezpečnostní upozornění

Vyhňte se kontaktu s vodou.

Naměřené hodnoty vždy konzultujte se svým lékařem.

Používejte pouze originální příslušenství.

Dlouhodobé nošení může způsobit podráždění kůže, např. zarudnutí či puchýře.

Každých 6-8 hodin kontrolujte správné umístění senzoru na ruce.

Přesnost měření může ovlivnit celá řada faktorů, jako např. nadměrný pohyb, nízký puls, problémy s hemoglobinem aj.

Obsah balení

Checkme O2; SpO2 senzor; nabíjecí kabel; manuál.

Základy používání

Před prvním použitím zařízení plně dobijte.

Krátkým stiskem Checkme O2 zapněte.

Stiskem cca. 3 sekundy zařízení vypnete.

Podržením tlačítka cca. 5 sekund provedete vynucené vypnutí.

Způsob nošení zařízení na zápěstí a prstu zkontrolujte s následujícím obrázkem.

Přepnutí mezi dvěma módy použití (viz kapitola Mód) provedete vždy po novém zapnutí zařízení.



Hodnoty na displeji



Na displeji se mohou ukazovat nejrůznější hodnoty, mezi kterými se přepínáte stiskem tlačítka.



Základní obrazovka spánkového módu



Základní obrazovka monitorovacího módu

SpO₂

Saturace krve kyslíkem



Puls v průběhu spánku /
v monitorovacím módu



Připojte konektor do zařízení



Umístěte prst do senzoru



Počítadlo kroků

O2 7.5  13

Hodnoty O2 a SpO2

Mód

Přepnutí mezi dvěma módy použití provedete vždy po novém zapnutí zařízení.

Checkme O2 může pracovat ve dvou základních módech. Spánkovém nebo monitorovacím. Rozdíly jsou následující.

	Spánkový mód	Monitorovací mód
Parametry	SpO2, tep, pohyb	SpO2, tep, pohyb, kroky
Okamžitý přenos hodnot	Ano	Ano
Délka záznamů	Max. 10 hodin	Max. 5 hodin
Detekce poklesu O2 v krvi	Ano	Ne
Obrazovka	Aktivace tlačítkem	Stále zapnutá
Bluetooth	Zapnuté při rozsvíceném displeji	Vždy zapnuté

Zaznamenávání a nahrávání hodnot


Po vybraném režimu zobrazení se na displeji ukážou hodnoty SpO2 a pulsu. Hodnoty zůstanou na displeji automaticky po dobu 2 sekund.

V průběhu měření doporučujeme vyhnout se prudkým pohybům prstu, na kterém je senzor umístěn. Měření může narušit také výrazně silné okolní světlo.

Vibrace

Monitorovací režim sleduje hodnoty SpO2 a krokoměru. Pokud jsou aktivované vibrace a hodnota SpO2 současně poklesne pod nastavenou hladinu, nebo je dosaženo cíle kroků, zařízení začne vibrovat. Vibrace můžete vypnout stiskem tlačítka.

Zobrazení hodnot na displeji mobilu

Po párování přes Bluetooth a spuštění aplikace stačí stisknout ikonu  a hodnoty se budou zobrazovat na displeji mobilního zařízení.

Ukončení zaznamenávání hodnot

Ukončení záznamů provedete buď sundáním senzoru z prstu, nebo Checkme O2 vypnete podržením tlačítka.

Aplikace Check O2

Aplikaci stáhnete z AppStore nebo Google Play.

V aplikaci vidíte podrobněji rozepsané naměřené výsledky, můžete měnit nastavení nebo hodnoty ukládat do cloudu.

Pozn. Pokud je Checkme O2 spárováno s mobilním telefonem, hodnoty se ukazují pouze na displeji mobilu, na Checkme je viditelná pouze ikona spárování.

Spárování přes Bluetooth

Zapněte Checkme O2.

Zapněte bluetooth na telefonu.

Spusťte aplikace Check O2.


Na úvodní obrazovce se objeví ID zařízení, které můžete připojit.

Pozn. Pokud se zařízení nachází ve Spánkovém módu, kontrolujte, aby displej během párování svítil. Při zhasnutém displeji je Bluetooth ve spánkovém modu vypnuté.

Využití cloudového úložiště

Použijte odkaz v aplikaci pro vytvoření účtu na cloud nebo zadejte cloud.viatomtech.com/register a zaregistrujte se.

V aplikaci se přihlaste přes vytvořený účet.

Klepněte v aplikaci na ikonu  a vyberte způsob synchronizace dat.

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny



elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prohlašuje, že Checkme O2 je ve shodě se základními požadavky směrnice 93/42/EEC.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Checkme Pulsebit O2

Spánkový monitor

Uživatelský manuál

Predstavení produktu

Spánkový monitor Checkme O2 slúži na sledovanie hodnôt SpO2 a pulzu. SpO2 je saturácia krvi kyslíkom, tj. koľko kyslíka prenáša červené krvinky.

Bezpečnostné upozornenie

Vyhňte sa kontaktu s vodou.

Namerané hodnoty vždy konzultujte so svojim lekárom.

Používajte len originálne príslušenstvo.

Dlhodobé nosenie môže spôsobiť podráždenie kože, napr.

Začervenanie či pľuzgiere.

Každých 6-8 hodín kontrolujte správne umiestnenie senzora na ruky.

Presnosť merania môže ovplyvniť celý rad faktorov, ako napr.

Nadmerný pohyb, nízky pulz, problémy s hemoglobínom a j.

Obsah balenia

Checkme O2; SpO2 senzor; nabíjací kábel; manuál.

Základy používania


Pred prvým použitím zariadenie plne dobite.

Krátkym stlačením check O2 zapnite.

Stlačením cca. Na 3 sekundy zariadenie vypnete. Podržaním tlačidla cca. 5 sekúnd vykonáte vynútené vypnutie.

Spôsob nosenia zariadenia na zápästí a prste skontrolujte s nasledujúcim obrázkom.

Prepínanie medzi dvomi módy použitie (pozri kapitolu Mód) vykonáte vždy po novom zapnutí zariadenia.

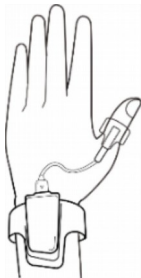

Hodnoty na displeji



Na displeji sa môžu ukazovať najrôznejšie hodnoty, medzi ktorými sa prepínate stlačením tlačidla.



Základná obrazovka spánkového módu



Základná obrazovka monitorovacieho módu

SpO₂

Saturácia krvi kyslíkom



Pulz v púbehu spánku / v monitorovacom móde



Pripojte konektor do zariadenia



Umiestnite prst do senzora



Počítadlo krokov

O2 7.5  13

Hodnoty O2 a SpO2

Mód

Prepínanie medzi dvomi módy použítie vykonáte vždy po novom zapnutí zariadenia.

Check O2 môže pracovať v dvoch základných módoch. Spánku alebo monitorovací. Rozdiely sú nasledovné.

	Spánkový mód	Monitorovací mód
Parametre	SpO2, tep, pohyb	SpO2, tep, pohyb, kroky
Okamžitý prenos hodnot	Ano	Ano
Dĺžka záznamov	Max. 10 hodín	Max. 5 hodín
Detekcia poklesu O2 v krvi	Ano	Nie
Obrazovka	Aktivace tlačidlom	Stále zapnutá
Bluetooth	Zapnuté při rozsvíceném displeji	Vždy zapnuté

Zaznamenávanie a nahrávanie hodnôt


Po vybranom režimu zobrazenia sa na displeji ukážu hodnoty SpO2 a pulzu. Hodnoty zostanú na displeji automaticky po dobu 2 sekúnd.

V priebehu merania odporúčame vyhnúť sa prudkým pohybom prsta, na ktorom je senzor umiestnený. Meranie môže narušiť tiež výrazne silné okolité svetlo.

Vibrácie

Monitorovacie režim sleduje hodnoty SpO2 a krokomeru. Ak sú aktivované vibrácie a hodnota SpO2 súčasne poklesne pod nastavenú hladinu, alebo je dosiahnuté cieľe krokov, zariadenie začne vibrovať. Vibrácie môžete vypnúť stlačením tlačidla.

Zobrazenie hodnôt na displeji mobilu

Po spárovaní cez Bluetooth a spustení aplikácie stačí stlačiť ikonu  a hodnoty sa budú zobrazovať na displeji mobilného zariadenia.

Ukončenie zaznamenávanie hodnôt

Ukončenie záznamov vykonáte buď zložením senzora z prsta, alebo check O2 vypnete podržaním tlačidla.

Aplikácia Check O2

Aplikáciu stiahnete z AppStore alebo Google Play.

V aplikácii vidíte podrobnejšie rozpísané namerané výsledky, môžete meniť nastavenia alebo hodnoty ukladať do cloudu.

Pozn. Ak je check O2 spárované s mobilným telefónom, hodnoty sa ukazujú len na displeji mobilu, na check je viditeľná len ikona spárovania.

Spárovanie cez Bluetooth

Zapnite Check O2.

Zapnite bluetooth na telefóne.

Spustite aplikácie Check O2.


Na úvodnej obrazovke sa objaví ID zariadenie, ktoré môžete pripojiť.

Pozn. Ak sa zariadenie nachádza v spánkovom móde, kontrolujte, aby displej počas párovania svietil. Pri zhasnutom displeji je Bluetooth v spánkovom móde vypnuté.

Využitie cloudového úložiska

Použite odkaz v aplikácii pre vytvorenie účtu na cloud alebo zadajte cloud.viatomtech.com/register a zaregistrujte sa.

V aplikácii sa prihláste cez vytvorený účet.

Kliknite v aplikácii na ikonu  a vyberte spôsob synchronizácie dát.

Likvidácia

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie



musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prehlasuje, že check O2 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 93/42 / EEC.



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.
Tlačové chyby vyhradené.